

برنامه آزمایش سرطان روده بزرگ

1 - قبل از انجام آزمایش

کیت را قبل از نشستن روی توالت جهت آزمایش آماده و مهیا کنید: برای این کار کیت را از پاکت آن بیرون آورده و دو نوار مقوایی را آماده داشته باشید.



به رویه نوار که روی آن (DO NOT OPEN) نوشته شده برای حصول اطمینان به صحت آزمایش دست نزنید.



این جزوه نحوه استفاده کیت را تشریح میکند. لطفاً دقیقاً آن را مطالعه کنید.

کیت حاوی:

- پاکت پست ارسال رایگان
- ۶ قلم نوار مقوایی
- کیت آزمایش نارنجی و سفید است




کیت حاوی ۳ قسمت جهت ۳ تحرک متفاوت مقعد است.


هر بار فقط یکی از آویخته ها را باز کنید. آویخته ها را از هم جدا نکنید.

2 - انجام آزمایش

در رویه ای که نامتان درج شده تاریخ را در محل تعبیه شده روی آویخته بنویسید.

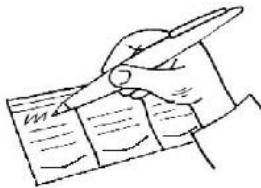

- رویه آویخته ۱ را بردارید.
- دو پنجره کوچک را برای قرار دادن نمونه ها می بینید.
- کیت و نوارها را در دسترس داشته باشید.

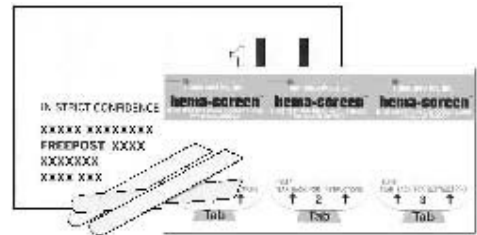

یادآوری مهم:

کیت باز نشده چندین ماه سالم باقی می ماند، ولی بعد از باز کردن باید ظرف ۱۴ روز از تاریخ اولین آزمایش تکمیل و ارسال گردد.

لطفا توجه کنید که کیت های دریافتی در تعطیلات آخر هفته تحت آزمایش قرار نمی گیرند.

3 - برداشتن نخستین نمونه

توجه: نمونه هائی که بر میدارید نباید پشت سر هم از یک تحرک مقعد برداشته شود. نمونه ها باید از سه تحرک متفاوت برداشته شود.

بررسی مجدد لیست کارهائی که باید انجام داده باشید

آیا نمونه ها را در هر شش پنجره قرار داده اید؟

آیا تاریخ را در هر سه آویخته درج کرده اید؟

آیا کیت آزمایش ظرف ۱۴ روز از تاریخ نخستین نمونه برداری به ما واصل می شود؟

اگر پاسخ شما به هر یک از سه پرسش فوق (نه) باشد لطفاً با مدیریت این برنامه و تلفن رایگان 0800 707 60 60 تماس بگیرید.

اگر پاسخ شما به هر سه پرسش فوق (آری) باشد، کیت را در پاکت رایگان پستی گذاشته و پس از بستن به صندوق پست بیاندازید. نگران نباشید، این پاکت منطبق با مقررات پستی تعبیه شده است. لطفاً دقت کنید که برای حفظ سلامت کارکنان پست، پاکت آلوده نباشد.

پرسشی دارید؟

با مدیریت برنامه و تلفن رایگان زیر تماس بگیرید
0800 707 60 60

تمام مکالمات تلفنی محرمانه باقی می ماند. برای دریافت اطلاعات و هرگونه راهنمایی خجالت نکشید. کارمندان ما برای کمک به شما آماده اند.



یادآوری مهم:

از قراردادن کیت در جای گرم و در برابر نور مستقیم خورشید خودداری کنید.


- مهم است که توجه کنید تحرک مقعدی که از آن نمونه برداری می کنید در کاسه توالت برداشته نشود چه اینکار روی نتیجه آزمایش موثر است. برای برداشتن نمونه از این طرق استفاده کنید:

• کاغذ توالت تاه شده

• دستتان با پوشش در کیسه پلاستیکی

• یک ظرف تمیز دور انداختنی

- برای برداشتن تکه کوچکی از تحرک مقعدی که اخیراً برداشته اید از یک نوار مقوایی استفاده کنید. آنرا روی پنجره اول پخش کنید.

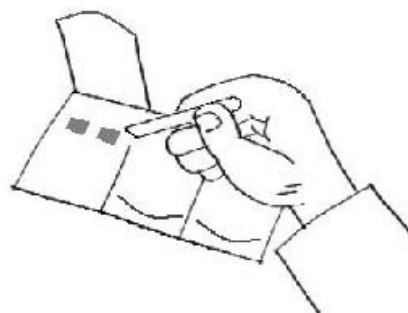

- با استفاده از نوار دیگری، نمونه دیگری از تحرک قسمت دیگری از مقعد بردارید و آن را روی پنجره دوم پخش کنید.

4 - وقتی که کار را به پایان می برید

- نوارهای استفاده شده را با کاغذ توالت پاک کنید و در سطل زباله بیاندازید. از انداختن نوارهای مقوایی در توالت خودداری کنید.

- رویه آویخته را بسته و از پشت زیر لبه نارنجی رنگ محکم کنید.

- از قرار دادن کیت در محل گرم و یا در برابر نور مستقیم خورشید خودداری کنید چه اینکار به آن آسیب میرساند. در پایان کار دستهایتان را بشوئید.

5 - برداشتن نمونه دوم

- تاریخ را روی آویخته ۲ درج کنید.

- آزمایش را با استفاده از دو پنجره زیر آویخته ۲ تکرار کنید.

6 - برداشتن نمونه سوم

- تاریخ را روی آویخته ۳ درج کنید.

- آزمایش را با استفاده از دو پنجره زیر آویخته ۳ تکرار کنید.